



Custom Art  
Piotr Granicki  
Litewska 5/9  
00-589 Warszawa  
tel. 697541666  
info@thecustomart.com

## Instrukcja dla Audiologów:

1. Wyciski powinny być wykonane z masy silikonowej o dużej gęstości. Zalecane jest użycie gąbkowych lub bawełnianych tamponików do zabezpieczenia błony bębenkowej.
2. Do wykonania monitorów lub nakładek na słuchawki, dla naszych klientów, potrzebujemy wycisków zrobionych za drugi zakręt, obejmujących: obrąbek (*helix*), odnogę obrąbka (*crus helix*), muszlę małżowiny (*concha*), skrawek (*tragus*) i przeciwskrawek (*antitragus*).
3. Po wstrzyknięciu masy do ucha należy ucisnąć ją kciukiem, aby uniknąć bąbelków powietrza lub ubytków w gotowym wycisku. Masa silikonowa powinna być utwardzona po 5min. Nie należy wyjmować wycisków przed upływem tego czasu.
4. Wycisk powinien być pobierany przy otwartych (na ok. 2,5cm), rozluźnionych ustach. Zalecane jest użycie tzw. Bite block'a, w celu maksymalnej stabilizacji żuchwy. W przypadku braku bite block'a klient może oprzeć zęby na czymś o zbliżonej wielkości np. kciuku. Otwarcie ust na tę szerokość jest optymalne, aby nasze produkty zapewniały pełną izolację
5. Brak ruchu żuchwy podczas procedury jest jednym z warunków uzyskania odpowiedniej izolacji w końcowym produkcie, dlatego podczas zabiegu klient nie powinien rozmawiać lub ruszać ustami.
6. W przypadku pytań proszę dzwonić, lub kontaktować się drogą elektroniczną.